

Használati útmutató

GYNOLACTA
Hüvelytabletta
Orvostechnikai eszköz**CO MILYEN TÍPUSÚ KÉSZÍTMÉNY A GYNOLACTA ÉS MILYEN ESETEKBE ALKALMAZHATO?**

A nőknek szánt GYNOLACTA hüvelytabletta hatóanyagként tejsavat tartalmaz. A hüvely pH-értéke általában 3,8 és 4,5 között van, savas kémhatású. A savasságát hüvelyi tejsavbaktériumok szabályozzák, amelyek tejsavat termelnek. A savas környezet gátolja egyéb hüvelyi baktériumok túlszaporodását és megakadályozza a kórokozó baktériumok szaporodását. A savasság bármilyen változása szokatlan, bűzös váladékhoz vezethet.

Bakteriális egyensúly megváltozása a hüvelyben (bakteriális vaginózis)

Ha a tejsavbaktériumok mennyisége csökken, csökken a hüvely savassága, ami a baktériumok egyensúlyhiányához vezet. A hüvely baktériumflóra egyensúlyának felborulása és az általa okozott tünetek gyakoriak a nők között. Az antibiotikum-kezelés, gombás fertőzés gyógyszeres kezelése, a menstruációs vérzés, a terhesség, a közösülés, a menopauza és a túlzott intim higiénia növelik a fogékonyágot a bakteriális vaginózisra. A bakteriális vaginózis leggyakoribb tünete a jellemzően kellemetlen szaggal járó, fokozott tejszerű vagy szürkés váladékozás. Ezenkívül enyhe viszketés is előfordulhat. Gyulladásával általában nem jár.

A GYNOLACTA bakteriális vaginózis esetén, illetve annak megelőzésére alkalmazható. A hüvely természetes savtartalmának helyreállítására és fenntartására.

A GYNOLACTA ÖSSZETÉTELE

Minden hüvelytabletta 50 mg tejsavat tartalmaz. Egyéb összetevők: kalcium-laktát, laktóz, hidroxipropil-metil-cellulóz, talkum és magnézium-sztearát. A termék nem illatosított és nem tartalmaz színezéket.

HOGYAN KELL ALKALMAZNI A GYNOLACTA

A készítmény használata előtt alaposan mosson kezet!

Felhasználási javaslat bakteriális vaginózis esetén:

Ujjjaival helyezzen be 1 hüvelytablettát mélyen a hüvelyébe lefekvés előtt, 7 napig.

Felhasználási javaslat bakteriális vaginózis megelőzése esetén:

Ujjjaival helyezzen be 1 hüvelytablettát mélyen a hüvelyébe lefekvés előtt, 3 napig.

A kezelés időtartama meghosszabbítható, és a kúra megismételhető az orvos által előírt módon (maximális alkalmazási idő 14 nap).

A Gynolacta menstruáció alatt alkalmazható.

Óvatosan vegye ki a tablettát a buborékfóliából, hogy az ne törjön el.

Ne felejtse a tablettát. A tablettát egészben kell behelyezni.

Forduljon orvoshoz,

- ha tünetei súlyosbodnak a kezelés során;
- ha tünetei 7 napos kezelés után is folytatódnak.

Terhesség és szoptatás

A GYNOLACTA terhesség és szoptatás alatt alkalmazható.

NE HASZNÁLJA A GYNOLACTA-T

- ha súlyos viszketést vagy fájdalmat tapasztal a hüvelyében. Ha ez bekövetkezik, forduljon orvoshoz.
- ha véres váladékozást tapasztal (a menstruációs vérzés kivételével). Ha ez bekövetkezik, forduljon orvoshoz.
- ha túlérzékeny a termék bármely összetevőjére.
- ha teherbe kíván esni, mert a hüvelytabletta csökkenti a hüvely pH-értékét, és az kedvezőtlenül hat a spermiumokra.
- ha a buborékcsoomagolás sérült.
- ha a hüvelytabletta sérült.
- a dobozon feltüntetett lejárati idő után. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.
- fogamzásgátlóként.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Átmeneti helyi irritáció, például égő érzés.

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos vértartalmú eseményeket kérjük, jelezzék a gyártónak és az országa illetékes hatóságának.

HOGYAN KELL A GYNOLACTA-T TÁROLNI ÉS ELDOBNI?

Tárolja a terméket 25 ° C alatti szobahőmérsékleten, az eredeti csomagolásban! A terméket gyermekektől elzárva tartsa!

Ne juttassa a terméket szennyvízbe és ne dobja háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogyan dobja el a már nem használt terméket. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

Csomag tartalma:

8 hüvelytablettát tartalmazó buborékcsoomagolás

Gyártó:

Vitalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500

Hämeenlinna, Finnország

Tel. +358 3 615 600

Ezt a használati útmutatót utoljára 2021.06.23 én módosították.



Gyártási tétel szám



Olvassa el a használati útmutatót



Gyártó



Lejárati idő



25°C Maximális tárolási hőmérséklet

NAVODILO ZA UPORABO

GYNOLACTA
vaginálne tablete**KAJ JE GYNOLACTA IN ZA KAJ SE UPORABLJA**

Učinkovina v vaginalnih tabletah GYNOLACTA za ženske je mlečna kislina. Običajno je pH raven nožnice med 3,8 in 4,5, kar pomeni kislo okolje. Kislost okolja v nožnici uravnava mlečnokislinske bakterije, ki proizvajajo mlečno kislino. Kislo okolje zavira prekomerno rast ostalih vaginalnih bakterij in preprečuje rast patogenih bakterij. Kakršna koli sprememba v kislosti privede do neobičajnega izcedka neprijetnega vonja.

Motnje bakterijskega ravnovesja v nožnici (bakterijska vaginoza)

Če se kislost okolja v nožnici ob zmanjšani količini mlečnokislinskih bakterij zniža, to privede do bakterijskega neravnovesja. Bakterijsko neravnovesje in s tem povezani simptomi so pri ženskah pogosti. Uporaba antibiotikov, zdravljenje glivičnega vnetja, menstrualne krvavitve, nosečnost, spolni odnosi, menopavza in pretirana intimna higiena povečajo dovzetnost za bakterijsko vaginozo. Najpogostejši simptom bakterijske vaginoze je povečana količina mlečnega ali sivkastege izcedka z značilnim neprijetnim vonjem. Pride lahko tudi do rahle srbečice. Vnetja običajno ni.

GYNOLACTA se uporablja pri bakterijski vaginozi in za njeno preprečevanje, da se obnovi in vzdržuje naravna kislost v nožnici.

SESTAVA IZDELKA GYNOLACTA

Vsaka vaginalna tableta vsebuje 50 mg mlečne kisline. Druge sestavine izdelka so kalcijev laktat, laktoza, hidroksipropilmetil celuloza, smukec in magnezijev stearat. Izdelek ne vsebuje dišav in barvil.

KAKO UPORABLJATI IZDELEK GYNOLACTANavodila za uporabo in odmerjanje pri bakterijski vaginozi:

7 večerov zapored pred spanjem s prsti vstavite po 1 vaginalno tableto globoko v nožnico.

Navodila za uporabo in odmerjanje pri preprečevanju bakterijske vaginoze:

3 večere zapored pred spanjem s prsti vstavite po 1 vaginalno tableto globoko v nožnico.

Obdobje uporabe se lahko skladno z zdravnikovim priporočilom podaljša in ponovi (najdaljše dovoljeno obdobje uporabe je 14 dni).

Gynolacta se lahko uporablja med menstruacijo.

Previdno odstranite tableto iz pretisnega omota in bodite pozorni, da se ta ne zdrobi.

Vaginálne tablete ne razpolavljajte. Vstaviti je treba celo tableto.

Pri uporabi izdelka poskrbite za dobro higieno rok.

Posvetujte se z zdravnikom,

- če se med uporabo vaši simptomi poslabšajo;
- če simptomi po 7 dneh uporabe vztrajajo.

Nosečnost in dojenje

Izdelek GYNOLACTA lahko uporabljate tudi če ste noseči ali dojite.

NE UPORABLJAJTE IZDELKA GYNOLACTA

- v primeru močne srbečice ali bolečine v nožnici. V tem primeru se obrnite na zdravnika.
- v primeru krvavega izcedka (ki ni menstruacija). V tem primeru se obrnite na zdravnika.
- če ste preobčutljivi na katero koli sestavino tega izdelka.
- če nameravate zanositi, saj bo vaginalna tableta znižala pH raven v nožnici, kar lahko poslabša pogoje za spermo.
- če je poškodovan pretisni omot.
- če je poškodovana vaginalna tableta.
- po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnicini. Rok uporabnosti se izteče na zadnji dan navedenega meseca.
- kot kontracepcijsko sredstvo.

MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Prehodno draženje neželene uporabe, na primer pekoč občutek.

V primeru resnih neželenih učinkov o tem obvestite proizvajalca in pristojni organ vaše države.

SHRANJEVANJE IZDELKA GYNOLACTA

Shranjujte pri sobni temperaturi do 25°C v originalnem pakiranju. Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom.

Izdelka ne smeteje odvreči v odpadne vode ali med gospodinjstvo odpadke. O načinu odstranjevanja izdelka, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Takı ukrepi pomagajo varovati okolje.

Pakiranje:

8 vaginalnih tablet v pretisnem omotu.

Proizvajalec in tržni zastopnik

Vitalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500

Hämeenlinna, Finska

Tel. +358 3 615 600

Datum zadnje revizije navodila: 23.06.2021.



Številka serije



Preberite navodilo za uporabo



Proizvajalec



Uporabno do



25°C Zgornja meja temperatura



Medicinski pripomoček